

# VÄGLEDNING FÖR ANVÄNDNING OCH RENGÖRING AV ENFIT KONNEKTOR




**1. RENGÖRING.** Efter varje tillförsel/måltid: Skölj ENFit kopplingen med ljummet vatten och rengör även i nedre delen av konnektorn – använd eventuellt en ren tandborste som hjälp.

**2. TILLKOPPLING.** Se till att sprutan/mataggregatet är ordentligt fastsatt. Undvik att skruva för hårt – **STOPPA** när du märker motstånd.



**3. KORK.** Se till att korken är ordentligt fastsatt och sluter tätt. Sätt i korken i kopplingen ordentligt och se till att remmen till korken är rät. Är remmen sned och vriden kan det medföra läckage.

**4. SAMMAKOPPLING.** Sätt sprutan i samma riktning som konnektorn - så gängen inte tar skada. Undvik att skruva för hårt – **STOPPA** när du märker motstånd.

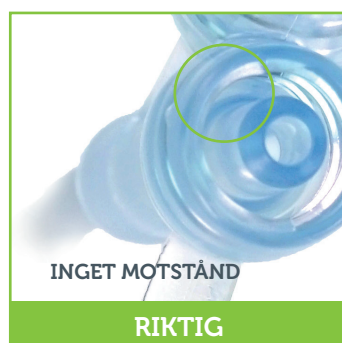

**5. FLERA ANSLUTNINGAR.** Undvik att möta motstånd med den andra kopplingen genom att vrida i motsatt riktning innan tillkoppling.

**6. FRÅNKOPPLING.** Undvik att forcera delarna från varandra om de sitter hårt samman. Försök att sära dem genom att blötlägga i ljummet diskvatten, exempelvis i en skål.

**lakta alltid god hygien**

1512.013 juli 2018

\*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health.