

VÄGLEDNING FÖR ANVÄNDNING OCH RENGÖRING AV ENFIT KONNEKTOR



- 1. RENGÖRING.** Efter varje tillförsel/måltid: Skölj ENFit kopplingen med ljummet vatten och rengör även i nedre delen av konnektorn – använd eventuellt en ren tandborste som hjälp.

- 2. TILLKOPPLING.** Se till att sprutan/mataggregatet är ordentligt fastsatt. Undvik att skruva för hårt – **STOPPA** när du märker motstånd.



- 3. KORK.** Se till att korken är ordentligt fastsatt och sluter tätt. Sätt i korken i kopplingen ordentligt och se till att remmen till korken är rät. Är remmen sned och vriden kan det medföra läckage.

- 4. SAMMANKOPPLING.** Sätt sprutan i samma riktning som konnektorn - så gängen inte tar skada. Undvik att skruva för hårt – **STOPPA** när du märker motstånd.



- 5. FLERA ANSLUTNINGAR.** Undvik att möta motstånd med den andra kopplingen genom att vrida i motsatt riktning före tillkoppling.

- 6. FRÅNKOPPLING.** Undvik att forcera delarna från varandra om de sitter hårt samman. Försök att sära dem genom att blötlägga i ljummet diskvatten, exempelvis i en skål.

lakta alltid god hygien

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning.
*TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatrix Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatrix.com
www.gastrostomi.se