



Mic-Key® – Gastrostomi butonu Kullanım ve bakımı


Mic-Key® Gastrostomi Butonu, çeşitli yutma zorluklarında gıda, sıvı ve ilaçları almak/vermek için basit, küçük ve esnek bir üründür. Anti-reflü valfi bulunduğu ve balonla tutulduğundan Mic-Key® ile normal hayat mümkün olduğunca az etkilenir.

Kullanım/alma/yemekler

Bulanti olmaması için, oturmak veya bir yere yaslanmak önerilir. Yiyecek/besleme tüpünün oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Uzatma setinin takılması ve çıkartılması:

Siyah sıraları hizalayın, içe bastırın ve bir çeyrek ila üç çeyrek tur arası çevirin; çıkartırken aynı mesafeyi geri doğru çevirin ve siyah sıralar hizalandığında dışarı çekin.

Her kullanımdan önce ve sonra uzatma setini ve Mic-Key®'i 10-20 ml su ile yıkayın. Bağlantı tüpü tek hasta içindir/tek kullanımlıdır ve birden fazla sefer kullanılırsa doğru temizlenmesi, buzdolabında tutulması ve 2-7 günde bir değiştirilmesi önemlidir.

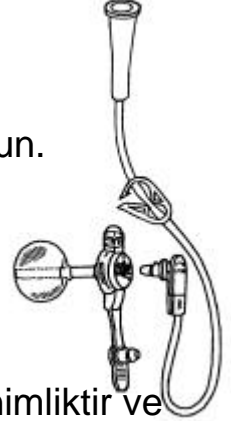

General bakım

Günlük temizliğin parçası olarak butonu yıkayın ve kurulaştırın. Dus almak veya banyo yapmak ya da yüzmek mümkündür. Bakım ve beslenmede iyi gıda hijyeni gözetin, steril prosedür değil.

Mic-Key® bakımı

Mic-Key®'i günlük yıkama zamanı çevirin.

Mic-Key® kullanılmıyorsa, suyla günlük yıkayın.

Balon/mansondaki suyu haftada bir, örneğin her Pazartesi kontrol edin ve değiştirin.

Mic-Key® evde değiştirilebilir ve iki ile üç ayda bir değiştirilmelidir; bu zamana kadar rengi değişir ve anti-reflü valfi zayıflamış olur.

Mic-Key® yerinden çıkarsa

Yeni bir tane alın ve mümkün olduğunca erken takın.

Yeni bir Mic-Key® yoksa, eskiyi alın, yıkayıp takın ve steril bir bant veya benzeri ile yerinde tutturun.

Stomanın açık kalması çok önemlidir – yeni bir Mic-Key® almak için doktorunuz/hemsirenizle mümkün olduğunca erken irtibat kurun.

İlaç alma/yemekte rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, hemsireniz ya da doktorunuzla irtibat kurun.

Daha fazla bilgi için, Mic-Key'in ana sayfasına bakın!

www.mic-key.nu