

# Mic-Peg gastrostomislång

## Skötsel

- Tvätta och torka torrt runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien och rotera Mic-Peg i stomat (ej de första 14 dagarna).
- Använd bipackad slang/kateterklämma, inga andra klämmor bör användas.
- När stomat är etablerat efter ca 8 veckor kan Mic-Peg avlägsnas genom att man drar den ut ur stomat, den kan då ersättas av en Mic-Key eller Mic-Bolus, detta görs på specialistklinik på sjukhus.
- Mic-Peg bör inte bytas i hemmiljö.
- Vid behov kan Mic-Peg adapter bytas i hemmiljö.
- Om Mic-Peg åker ut kontakta snarast din sjuksköterska eller läkare. Sätt under tiden in en Mic-Bolus, Mic-Key eller liknande (det är mycket viktigt att hålla stomat öppet).

## Allmänna råd

- Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun.
  - Rodnad, vätskande, öm hud kan bero på läckage, tvätta och lufttorka flera gånger per dag. Om besvären kvarstår kontakta din sköterska.
  - Illamående kan bero på för snabb eller för stor måltid. Prova att ge mindre mängd oftare.
  - Diarré kan bero på för snabb matning, för gammal mat eller maginfluensa. Ändring av kost, läkemedelsbehandling eller matningsrutiner kan också orsaka diarré.
- Varar diarrén i mer än tre dagar, tala med din sjuksköterska/läkare.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida



1512-024-dec-2018

# Mic-Peg gastrostomisläng

Du har fått en gastrostomiport Mic-Peg insatt i gastrostomin (datum): .....

Mic-Peg är av storlek ..... Fr .

Vid insättandet är stomikanalen ..... cm lång. Ev. reglering ..... cm.

Kontaktperson ..... Tel. nr.: .....



1. Port för mat, läkemedel och vatten
2. Stopp-platta
3. Inre stopp-platta i magen

## Adaptrar

Mic-Peg adaptern går även att beställa separat.



Artikelnummer  
8135-FR

## Användning

- Före måltid kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på Mic-Peg är den samma som vid insättandet eller efter reglering. Vid osäkerhet kontrollera maginnehåll med pH-sticka eller motsvarande
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom Mic-Peg med 10-20 ml vatten.
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30°), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
- Se till att den enterala näringen är ljummen/rumstempererad.
- Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska/läkare.
- Om Mic-Peg inte används spola alltid igenom denna med 10-20 ml vatten dagligen.

*Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken.*

**Gastrostomi** = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.