



ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL MIC-KEY® GASTROSTOMIPORT I HEMMET

Goda råd:

1. Mät ut korrekt stomilängd med hjälp av Mic-mätstickan. Ha alltid en mätsticka tillgänglig.
2. Utarbeta fasta rutiner angående skötseln av Mic-Key®, t. ex.:
Kontrollera att ballongen har rätt mängd sterilvatten varje måndag.
3. Tillämpa och iakttag vanlig god mathygien vid all skötsel och matning i Mic-Key®. Inget sterilt förfaringssätt.

1

*Detta gör du
en gång per dag:*

1. Tvätta huden runt stomin en gång om dagen som en del i den dagliga morgon- eller kvällstoaletten, torka därefter huden runt stomin torr.
2. Skölj kopplingsslangarna med 10 - 20 ml vatten före och efter varje matning.
3. Roter Mic-Key® ett varv i stomat i samband med den dagliga morgon- eller kvällstoaletten.

2

*Detta gör du
varje vecka:*

Kontrollera och byt vattenmängden i ballongen, exempelvis varje måndag.

3

*Detta gör du
varannan månad:*

Betrakta och behandla Mic-Key® som ett ätredskap. Ta därför en ny Mic-Key c:a varannan månad, då kommer den att vara missfärgad och återflödesventilen vara försvagad.

OBS! Vid smärta/obehag i matningssituationen, avbryt mattillförseln och kontakta sjuksköterska/läkare.

Kontakta oss om du vill ha vår "Vägledning för korrekt användning och vård"