

Kopplingslangar med ENFit till Mic-Key



Rak Bolusslang

0143-12, 30 cm
0143-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang
med medicinport**

0141-12, 30 cm
0141-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang
med medicinport**

0142-02, 5 cm



**Vinklad kopplingslang
utan medicinport**

0144-12, 30 cm
0144-24, 60 cm

MED-2020-0022 APP

Mic-Key™



Du har fått en Mic-Key insatt i gastrostomin (datum):

Din Mic-Key är av storlek Fr och stomalängd cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med ml vatten.

Telefonnummer vid beställning

Kontaktperson

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken.

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic-Key gastrostomiport med låg profil (liten och diskret) är en produkt för att ge/få näring, vätska och medicin vid olika näringsbehov. Mic-Key har en inbyggd backventil med speciellt anpassad låsmekanism för att med kopplingsslangen underlätta säker anslutning vid näringstillförsel.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida
www.gastrostomi.se

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)
TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.
Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.
E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

Mic-Key™

Användning, tillförsel och måltid med Mic-Key

- Var noga med hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringssätt.
- En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk.
- Till- och frånkoppling av kopplings slang: Svart streck (på kopplings slang) mot svart streck (på Mic-Key), tryck in, vrid kopplings slangen ett kvarts- till trekvartsvarv. Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut kopplings slangen när svart streck är mot svart streck.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom kopplings slangen och Mic-Key med 10-20 ml vatten. Fyll gärna kopplings slangen innan tillkoppling till Mic-Key.
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta (minst 30°), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
- Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.
- Om Mic-Key inte används, spola alltid igenom med 10-20ml vatten dagligen.

- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m. Näringen/maten bör vara ljummen, kropps- eller rumstempererad.

Om din Mic-Key åker ut

- Ta en ny och sätt in denna så snart som möjligt. Har du ingen hemma, ta den gamla, tvätta den, stoppa in och fäst med sårtejp eller liknande. Det är mycket viktigt att hålla gastrostomikanalen öppen. Kontakta snarast sjuksköterska/doktor för att få en ny Mic-Key.

Skötsel och byte

- Tvätta och torka runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien. Inget förband behövs.
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med Mic-Key.
- Mic-Key kan bytas i hemmiljö: av de som fått instruktion om hur byte går till.
MIC-Key är tillverkad i silikon. Silikon har en livslängd på ca 1-8 månader men det varierar, för de allra flesta är det normalt att materialet försvagas (på grund av magsaftens surhetsgrad, medicinering mm) efter 2-4 månader.

Vår rekommendation är att man byter MIC-Key regelbundet var 2-3 månad för att undvika obehag vid byte eller att den åker ut ofrivilligt och orsakar onödigt besvär.

Vid bytet kommer Mic-Key vara missfärgad och det är normalt.

- Byte av Mic-Key: Ta en ny, fyll ballongen (märkt BAL) med 3-5 ml sterilt eller rent (kockt avsvolat) kranvatten och kontrollera denna, töm den igen. Töm ballongen (märkt BAL) på den gamla Mic-Key och dra ut den ur gastrostomikanalen. Doppa den nya Mic-Key i lite glidmedel, för in den (ballongdelen), fyll ballongen med 3-5 ml (max 10 ml, max 5 ml för 12 Fr) sterilt eller rent (kockt avsvolat) kranvatten.
Verifiera att läget är riktigt på den nya Mic-Key med t ex en pH-sticka (koppla till en kopplings slang dra med spruta tillbaka lite maginnehåll och spruta ut på pH-stickan). Släng den gamla Mic-Key.
- Kontrollera och fyll eventuellt på ballongen/kuffen med vatten (3-5ml) en gång i veckan, exempelvis varje måndag.

- Kopplings slangen är en enpatients slang. Om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt med varmt diskvatten med noggrann sköljning efter, förvaras rent och torrt. Vi rekommenderar för bästa hygien att kopplings slangen byts var eller varannan dag. I hemmiljö, med noggrann rengöring, kan kopplings slangen om den ser ren och hel ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell anpassning.

Allmänna råd

Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det.

Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent med vatten och lufttorka flera gånger per dag. Smörj gärna in området med mjukgörande kräm vid behov.

Om området med rodnad, svullnad kvarstår eller vid ömhet/smärta, kontakta din sjuksköterska/läkare.