

## Kopplingslangar med ENFit till Mic-Key GJ



**Rak Bolusslang**

0143-12, 30 cm  
0143-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang  
med medicinport**

0141-12, 30 cm  
0141-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang  
med medicinport**

0142-02, 5 cm



**Vinklad kopplingslang  
utan medicinport**

0144-12, 30 cm  
0144-24, 60 cm

MED-2020-0021 APP

## Mic-Key™ GJ

Du har fått en Mic-Key GJ insatt i gastrostomin (datum): .....

Din Mic-Key GJ är av storlek ..... Fr och stomalängd ..... cm.

Den jejunala längden är ..... cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med ..... ml vatten.

Telefonnummer vid beställning .....

Kontaktperson ..... Tel. nr: .....



*Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken och tunntarmen.*

**Gastrostomi** = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic-Key GJ gastrostomiport med låg profil (liten och diskret) är en produkt för att ge/få näring, vätska och medicin på ett säkert sätt till magsäcken och tunntarmen vid olika näringsbehov. Med Mic-Key GJ kan man också tömma/dränera magsäcken. Mic-Key GJ har inbyggd backventil med speciellt anpassad låsmekanism för att med kopplingsslangen underlätta säker anslutning.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida [www.gastrostomi.se](http://www.gastrostomi.se)

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)  
TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.  
Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.  
E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

# Mic-Key™ GJ

## Användning, tillförsel och måltid med Mic-Key GJ

- Var noga med hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfarings sätt.
- En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk.
- Till- och från koppling av kopplings slang: Svart streck (på kopplings slang) mot svart streck (på Mic-Key GJ), tryck in, vrid kopplings slangen ett kvarts- till trekvarts varv. Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut kopplings slangen när svart streck är mot svart streck.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid genom kopplings slangen och Mic-Key GJ med 20-50 ml vatten. Fyll gärna kopplings slangen innan tillkoppling till Mic-Key GJ.
- Vid tillförsel av näring/läkemedel/ vatten till jejunum koppla kopplings slang i kopplings fatningen för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum (märkt "JEJUNAL").  
**OBS!** Ej ballongkanalen (BAL) eller "GASTRIC".
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta (minst 30°), fortsatt gärna med detta en stund efter måltid.
- Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.
- Om Mic-Key GJ inte används, spola alltid igenom den Jejunala delen (märkt "JEJUNAL") med 20-50 ml vatten dagligen.
- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m. Näringen/maten bör vara ljummen, kropps- eller rumstempererad.
- Vid tillförsel eller tömning av ventrikeln/ magsäcken, koppla en kopplings slang till den port som är märkt med "GASTRIC". Om möjligt, spola igenom med 5-10 ml vatten efter tömning.

## Skötsel

- Tvätta och torka runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien. Inget förband behövs.
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med Mic-Key GJ.
- Om Mic-Key GJ åker ur gastrostomi-kanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående. Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten – om detta inte hjälper kontakta sjuksköterska. Byte av din Mic-Key GJ sker på sjukhuset.
- Kontrollera och fyll eventuellt på ballongen/kuffen med vatten (3-5ml) en gång i veckan, exempelvis varje måndag.
- Kopplings slangen är en enpatients slang. Om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt med varmt diskvatten med noggrann sköljning efter, förvaras rent och torrt. Vi rekommenderar för bästa hygien att kopplings slangen byts var eller varannan dag. I hemmiljö, med noggrann rengöring, kan kopplings slangen om den ser ren och hel ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell anpassning.

## Allmänna råd

Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det.

Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent med vatten och lufttorka flera gånger per dag. Smörj gärna in området med mjukgörande kräm vid behov.

Om området med rodnad, svullnad kvarstår eller vid ömhet/smärta, kontakta din sjuksköterska/läkare.