


Mic GJ

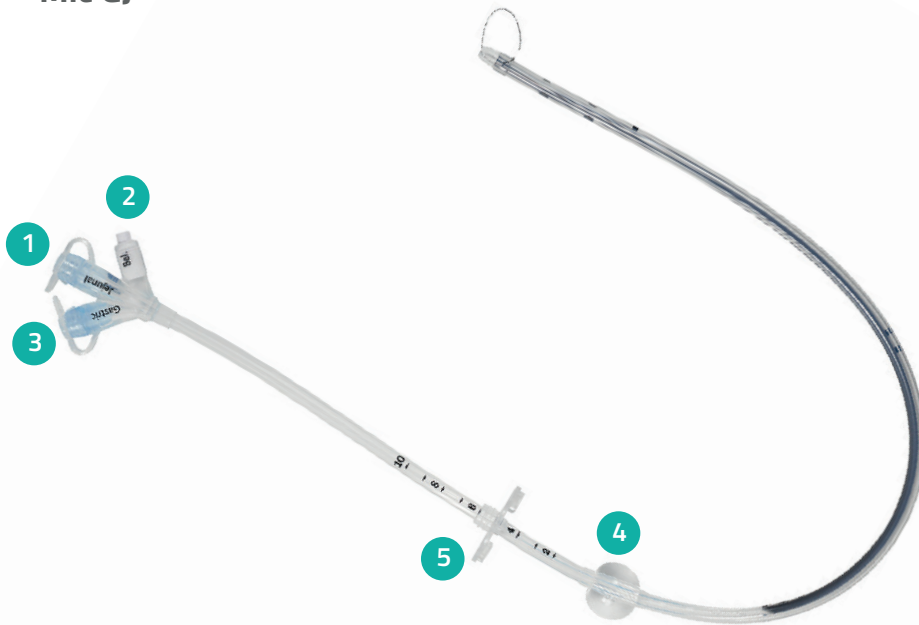

MEED-2020-0038 JUNE

1. Port till Jejunum (Jejunal) för mat, läkemedel och vatten
2. Ballongkanal (Bal.)
3. Port till magsäcken (Gastric) för tömning/luftnig och ev tillförsel av mat, läkemedel och vatten
4. Kuff/ballong
5. Stopp-platta

Mic™ GJ

Du har fått en Mic GJ insatt i gastrostomin (datum):

Din Mic GJ är av storlek Fr och stomalängd cm.

Den jejunala längden är cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med ml vatten.

Vid insättandet är stomikanalen cm lång. Ev. reglering cm.

Kontaktperson Tel. nr.:

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken och tunntarmen.

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic GJ gastrostomiport är en produkt för att ge/få näring, vätska och medicin på ett säkert sätt till magsäcken och tunntarmen vid olika näringsbehov. Med Mic GJ kan man också tömma/dränera magsäcken.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida

www.gastrostomi.se

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)

TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.

E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

©2020 Meda AB (A Mylan Company)

Mic™ GJ

Användning, tillförsel och måltid med Mic GJ

- Var noga med hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringssätt.
- En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på Mic GJ är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid genom Mic GJ med 10-20 ml vatten.
- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m. Näringen/maten bör vara ljummen, kropps- eller rumstempererad.
- Vid tillförsel av näring/läkemedel/vatten till jejunum koppla agregat/spruta till fattningen för tillförsel till jejunum (märkt "JEJUNAL").
OBS! Ej ballongkanalen (BAL) eller "GASTRIC".
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta (minst 30°), fortsatt gärna med detta en stund efter måltid.
- Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.
- Om Mic GJ inte används, spola alltid igenom den Jejunala delen (märkt "JEJUNAL") med 20-50 ml vatten dagligen.
- Vid tillförsel eller tömning av ventrikeln/magsäcken, öppna och koppla den port som är märkt med "GASTRIC". Om möjligt, spola igenom med 5-10 ml vatten efter tömning.
- Använd inte slang/kateterklämmor då dessa kan skada din Mic GJ.

Skötsel

- Tvätta och torka runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien. Inget förband behövs.
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med Mic GJ.
- Om Mic GJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående. Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten – om detta inte hjälper kontakta sjuksköterska. Byte av din Mic GJ sker på sjukhuset.
- Kontrollera och fyll eventuellt på ballongen/kuffen med rent vatten, (kokat och avsvalnat kranvatten eller sterilt vatten) i ballongen/kuffen varannan vecka (använd inte NaCl).
- Undvik om möjligt att ha kompress runt gastrostomin.
- Justera stopp-plattans (nr. 5 i bilden på sidan 4) läge vid behov.

Allmänna råd

Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det.

Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent med vatten och lufttorka flera gånger per dag. Smörj gärna in området med mjukgörande kräm vid behov.

Om området med rodnad, svullnad kvarstår eller vid ömhet/smärta, kontakta din sjuksköterska/läkare.