

Korrekt uppstart av Farrell® Valve System

- Stäng både den vita ❶ och den blå ❷ klämman på Farrell-slangen.
- Koppla på näringsaggregatet ❸ på sedvanligt sätt, med eller utan pump.
- Koppla till mat-/aggregat-slangen till Y-kopplingen på Farrellslangen ❹.
- Öppna den vita ❶ klämman på Farrellslangen.
- Fyll/prima näringsaggregatet och ev pumpen samt i Farrellslangen ca 5-10 cm ❺.
- Stäng den vita klämman ❶. Öppna därefter den blå klämman ❷ och fyll/prima resten av matslangen som vanligt.
- Öppna den vita klämman ❶ och starta matningen.


OBS!

Mat/näringspåsen och Farrell-påsen bör hänga på samma höjd. Ibland kan det bli bättre resultat om Farrellpåsen hänger något lägre än maten men den ska alltid vara ovanför huvudhöjd.

Aspirera luft ur magen innan tillkoppling av Farrell och mat/sondnäring.

Artikelnummer: 44-4100
– förpackning om 30 st.

För ytterligare information se www.gastrostomi.se eller kontakta oss på tel 08-630 19 00 eller e-post md@mylan.com

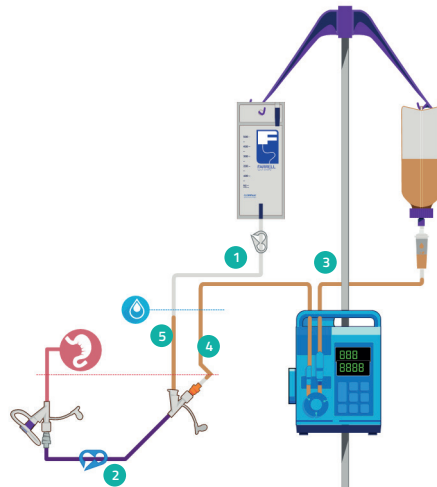

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company) TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

Meda AB (A Mylan Company)
Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.
E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

©2020 Meda AB (A Mylan Company)

FARRELL® Valve dekompressionssystem



Vad är FARRELL?

FARRELL Valve är ett slutet system, som tillåter evakuering av överskottsluft och dränering/opsamling av enterala näringslösningar och ventrikelinnehåll hos patienter som använder enteral anordning med ENFit-koppling. Med Farrell Valve kan patienten undgå att känna uppblåsthet och att få sura uppstötningar.

1. FARRELL påse – 1 storlek
2. Luftventil
3. ML markering
4. ENFit konnektor
5. För upphängning
6. Regleringsklämma (vit)
7. Stängningsklämma (blå)



FARRELL Valve

- Fungerar som ventil för överskottsluft och näring
- Slutet system som säkrar rätt intag av medicin och näring
- Reducerar smärta och obehag hos patienten
- Utjämnar näringsintaget vid långsam magtömning
- Hållbar 24 timmar
- Kan användas till neonatal, barn och vuxna.

FARRELL Valve produktbeskrivning

Vem kan ha nytta av FARRELL? – Patienter som

- Har långsam ventrikeltömning
- Har tendens till illamående/kväljning under matintag
- Har tendens till sura uppstötningar
- Har tendens till oppkördhet
- Sväljer mycket luft, ex under CPAP-behandling
- Lider av återkommande aspirationspneumonier.

Hur fungerar FARRELL?

FARRELL fungerar med ett hydrostatiskt tryck, som gör, att sondmaten samlas i FARRELL påsen, om trycket i ventrikeln är högt. När överskjutande luft i magen har evakuerats genom ventilen i påsen och trycket sjunkit i magen rinner maten tillbaka till ventrikeln.

Hur ska jag ge läkemedel?

- Använd en port nära sonden/gastrostomin
- Stoppa pumpen/näringen
- Stäng den blå klämman
- Skölj med vatten
- Administrera läkemedel
- Skölj efter med vatten
- Vänta 5-10 minuter innan den blå klämman öppnas igen
- Starta pump/näringstillförsel

Observera att volymen i Farrellslangen är totalt 9,6 ml – och 3,2 ml från Y-porten till Farrellslangen.

Uppkoppling av FARRELL påsen och råd

– Kort uppstartsguide på baksidan

- Aspirera luft från ventrikeln med en spruta innan tillkoppling.
- FARRELL påsen och mat/näringslösningen bör hänga på samma nivå.
- FARRELL Y-kopplingen ska alltid vara placerad i nivå under patientens ventrikel.

OBS! Pumpen larmar inte för stopp, när FARRELL-påsen är i gång.

Den blå luftventilen på FARRELL-påsen får inte bli fuktig eller våt, håll påsen hängande – blir ventilen fuktig ska den bytas och en ny påse hängas upp.