

Introduktion

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken/tunntarmen.

Gastrostomi = Kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras

Användning

- ✓ En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på Mic-TJ är den samma som vid insättandet eller efter reglering.
- ✓ Före och efter tillförsel av mat/läkemedel spola alltid igenom Mic-TJ med 20- 50 ml vatten, gärna mer.
- ✓ Vid tillförsel av näring/läkemedel koppla en spruta eller ett aggregat direkt i kopplingsstycket för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum (märkt "JEJUNAL"). OBS Ej ballongkanalen (BAL).
- ✓ Läkemedel ges alltid i flytande form, tabletter löses i vatten.
- ✓ För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30°), fortsatt gärna med detta en stund efter måltid.
- ✓ Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
- ✓ Se till att enterala näringen är rumstempererad.

- ✓ Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska eller läkare.
- ✓ Om Mic-TJ inte används spola alltid igenom denna med 20-50 ml dagligen.
- ✓ Vid tömning av ventrikeln/magsäcken öppnas den port som är märkt med "GASTRIC".

Skötsel

- ✓ Tvätta och torka tort runt stomin som en del av den dagliga hygien.
- ✓ Undvik om möjligt att ha kompress runt stomat.
- ✓ Använd inte slang/kateterklämmor då dessa skadar din Mic-TJ.
- ✓ Kontrollera och byt vatten i ballongen varje eller varannan vecka (använd inte NaCl).
- ✓ Om Mic-TJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/sjuksköterska omgående.
- ✓ Vid eventuellt stopp i slangen kan man prova att spola med vischyvatten - om detta inte hjälper kontakta sjuksköterska.

Generella råd

- ✓ Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun.
- ✓ Rodnad, vätskande, öm hud kan bero på läckage, tvätta och lufttorka flera gånger per dag. Om besvären kvarstår kontakta din sköterska.
- ✓ Illamående kan bero på för snabb eller för stor måltid. Prova att ge mindre mängd oftare.
- ✓ Diarré kan bero på för snabb matning, för gammal mat eller maginfluensa. Ändring av kost, läkemedelsbehandling eller matningsrutiner kan också orsaka diarré. Varar diarrén i mer än tre dagar, tala med din sjuksköterska/läkare.



För mer information kontakta oss gärna och besök gärna
Mic-Key´s hemsida

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL MIC TJ

Mic-Transgastric Jejunal Feeding tube

Du har fått en Mic- TJ insatt (datum)..... i gastrostomin.

Din Mic-TJ är av storlek.....Fr och ballongstorlek.....

Den jejunala längden är cm.

Vid insättandet är stomikanalen cm lång.

Ev reglering.....cm

Vid insättning är ballongen kuffad med ml vatten.

Kontaktperson.....Tel nr.....

