



MIC-KEY® ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL I HEMMET

PËRDORIMI DHE

PËRKUJDESJA NË SHITËPI

1.
***Këtë e bën
një herë në ditë***

1. Laj lëkurën rreth e përfaq stomisë një herë në ditë, si një pjesë e toaletit tënd të përditshëm të mëngjesit ose të mbrëmjes, fshij më pas lëkurën rreth e përfaq stomisë që të jetë lëkura e tharë.
2. Shpëlaj pajisjet bashkuese të zorrëve të gomës me 10-20 ml ujë para dhe pas të ushqyerit.
3. Roter Mic-Key® një rrotullim në stomat me rastin e toaletit të mëngjesit ose të mbrëmjes.

2.
***Këtë e bën
çdo javë***

Kontrollo dhe ndërro sasinë e ujit në ballon, p.sh. çdo të hënë.

3.
***Këtë e bën
çdo të dytin muaj***

Kij parasysh dhe trajto Mic-Key® si një mjet për ngrënie. Merr pra një Mic-Key® të ri çdo të dytin muaj, se atëherë ai do të merr ngjyrë të gabuar si dhe ventili i rirrjedhës do të jetë i dobësuar.