

**MEDA**

Mic-Key® – Gastrostomiport (ulazni deo gastrostome) Upotreba i održavanje

Mic-Key® Gastrostomiport jeste jednostavan, mali i gibak proizvod za davanje/dobijanje hrane, tečnosti i lekova na bezbedan način kod različitih problema prilikom gutanja. Sa Mic-Key® se može živeti koliko je to moguće normalno, jer ima odbijni ventil i pričvršćen je balonom.

Primena/dopremanje /obrok

Da bi se izbegla mučnina, preporučuje se da osoba sedi /bude u polusedećem položaju.

Postarajte se da hrana/ishrana koja se uzima putem sonde bude na sobnoj temperaturi

do i od spojnice od creva za povezivanje:

Crna crta ka crnoj crti, gurnite unutra,


okrenite za četvrt do trećine obrtaja,

prilikom odvrtanja okrenite natrag istim putem i

izvucite kada crna crta bude na crnoj crti.

Ispirite crevo koje služi za povezivanje Mic-Key® sa

10-20 ml vode pre i posle svakog dopremanja. Crevo koje služi za povezivanje je jednokratno / za jednog pacijeta, a ukoliko se više puta koristi bitno je da bude često očišćeno, da se čuva u frižideru i menja najmanje na svakih 2 -7 dana.

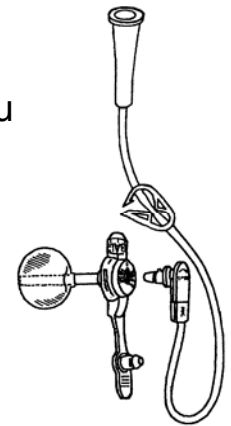

Opšte održavanje

Operite i osušite prostor oko stome kao deo svakodnevne higijene.

Sa njim se dosta lako tušira, kupa u u kadi, bazenu itd.

Dobro se pridržavajte higijene hrane prilikom održavanja i hranjenja, nikakvi sterilni postupci čuvanja.

Održavanje Mic-Key® aparata

Tokom svakodnevnog pranja, rotirajte Mic -Key®.

Ukoliko ne koristite Mic-Key® , isperite ga vodom svakoga dana.

Kontrolišite i promenite vodu i balonu /kesici jednom nedeljno, na primer, svakog ponedeljka.

Mic-Key® može da se zamenjuje kod kuće i trebalo bi da se menja svakog trećeg meseca, tada će promeniti boju, a povratni ventil će biti oslabljen.

Ukoliko se Mic-Key® izvuče

Uzmite novi i postavite ga što pre možete.

Ukoliko nemate novi Mic-Key® uzmite stari, operite ga, vratite ga unutra i pričvrstite flasterom ili nečim sličnim.

Veoma je važno da van stoma ostane otvorena – kontaktirajte što pre medicinsku sestru/doktora za novi Mic-Key®.

Kod neprijatnih bolova povezanih sa dopremanjem/obrokom kontaktirajte medicinsku sestru/doktora.

Za više informacije posetite Web lokaciju Mic-Key!
www.mic-key.nu