



Mic-Key® – Gastrostomiport Användning och skötsel

Mic-Key® Gastrostomiport är en enkel, liten och smidig produkt för att ge/få näring, vätska och läkemedel på ett säkert sätt vid olika sväljningsbesvär. Med Mic-Key® kan man leva så vanligt som möjligt då den är liten, har en backventil och är ballongfixerad.

Användning/tillförsel/måltid

För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta.


Till och från koppling av kopplings slang:

Svart streck mot svart streck, tryck in, vrid ett kvarts- till trekvarts varv, vid fränkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut när svart streck är mot svart streck.

Spola igenom kopplings slangen och Mic-Key® med

10-20 ml vatten före och efter varje tillförsel. Kopplings slangen är engångs / en patients, om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt, förvaras i kylskåp och vi rekommenderar att den byts var- eller varannan dag.

Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid kontakta din sjuksköterska eller doktor.

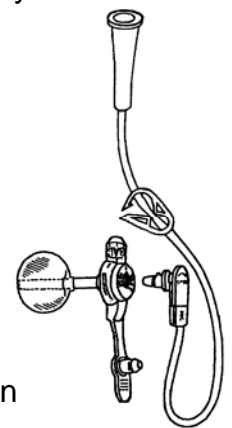

Allmän skötsel

Tvätta med tvål och vatten och torka runt stomin som en del av den dagliga hygien.

Det går mycket bra att duscha, bada badkar, bassäng mm.

Iaktta god mat-hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringsätt.

Skötsel av Mic-Key®

Rotera Mic-Key® i samband med daglig tvätt.

Om Mic-Key® inte används spola igenom dagligen med vatten.

Kontrollera och byt vatten i ballongen/kuffen en gång i veckan, exempelvis varje måndag.

Mic-Key® kan bytas i hemmiljö och bör bytas varannan månad, då kommer den att vara missfärgad och backventilen vara försvagad.

Om Mic-Key® åker ut

Ta en ny och sätt in denna så snart som möjligt.

Om du inte har en ny Mic-Key®, ta den gamla, tvätta den, stoppa in och fäst med sårtejp eller liknande.

Det är mycket viktigt att hålla stomat öppet – kontakta snarast sjuksköterska/doktor för att få en ny Mic-Key®.

För mer information se Mic-Key´s egen hemsida
www.mic-key.se